

Bastão de politetrafluoretileno (PTFE) / protetor temporário para parafusos das próteses sobre implantes

Descrição detalhada do produto, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

Produto: Bastões de Politetrafluoretileno (PTFE) utilizados para proteção de parafusos das próteses sobre implantes orais. Este produto não fica em contato com o meio oral, devendo ser vedado com material restaurador definitivo ou temporário, como resinas fotopolimerizáveis.

Composição química: Politetrafluoretileno (PTFE).

Características técnica: Bastões de ptfé na cor branca, inerte, biocompatível e atóxico. Não estéril.

Indicações de Uso

Indicado para proteção temporária de parafusos das próteses sobre implantes

Instruções Passo a Passo

Após parafusar a prótese sobre implante ou o componente protético da prótese sobre implante inserir o bastão, do comprimento selecionado, no interior da cavidade com auxílio de um instrumento (calcador). Deixar espaço para o fechamento do orifício com material restaurador definitivo ou provisório.

Para a remoção do bastão do interior da cavidade, usar um instrumento como a sonda exploradora ou similar.

Contraindicações: Não há contra-indicações.

Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do produto, bem como informações úteis para evitar determinados riscos decorrentes da implantação do produto.: O produto é somente para uso odontológico.

Efeitos Adversos: Produto pode causar reações alérgicas em pessoas com sensibilidade ao componente da fórmula

Produto de uso único. Proibido reprocessar. Não Estéril.

O produto deve ser descartado conforme regulamentações locais.

Cuidados de Conservação: Não usar se o pacote estiver aberto ou danificado. Conservar em local seco e fresco, em temperatura ambiente.

Formas de apresentação

BASTAO de PTFE 1,58mm de diâmetro / tamanhos 2, 3 e 4 mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé sortidos entre 2,3 e 4 mm na cor branca

BASTAO de PTFE 1,58mm de diâmetro / tamanhos 2mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé 2 mm na cor branca

BASTAO de PTFE 1,58mm de diâmetro / tamanhos 3mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé 3 mm na cor branca

BASTAO de PTFE 1,58mm de diâmetro / tamanhos 4mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé 4 mm na cor branca

BASTAO de PTFE 1,58mm de diâmetro / tamanhos 5mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé 5 mm na cor branca

BASTAO de PTFE 2,38mm de diâmetro / tamanhos 2, 3 e 4 mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé sortidos entre 2,3 e 4 mm na cor branca

BASTAO de PTFE 2,38mm de diâmetro / tamanhos 2mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé 2mm na cor branca

BASTAO de PTFE 2,38mm de diâmetro / tamanhos 3mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé 3mm na cor branca

Instruções de Uso – Família Bastão de politetrafluoretileno –PTFE

BASTAO de PTFE 2,38mm de diâmetro / tamanhos 4mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé 4mm na cor branca
BASTAO de PTFE 2,38mm de diâmetro / tamanhos 5mm Caixa contendo 60/120 unidades de bastões ptfé 5mm na cor branca

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 03 anos.


Uso Profissional.

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.

Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 21-2270-9661 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail contato@osseocon.com.br

Fabricado por: Osseocon Biomateriais Indústria e comércio de materiais odontológicos LTDA. Endereço: Rua Sariema 47 – Bairro: Olaria - RJ - CEP: 21031-550. **CNPJ:** 09.08.1537/0001-06. Telefone: 55 212270-9661.Registro ANVISA Classe II
Responsável técnico: Márcio Baltazar Conz - CRO RJ nº. 19728-2 / CPF 021405777-10

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

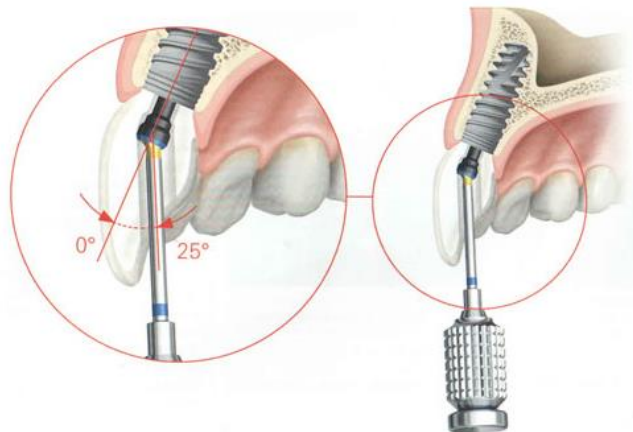

Momento de fixação do parafuso a prótese sobre implante ou o componente protético da prótese sobre implante



Instruções de Uso – Família Bastão de politetrafluoretileno –PTFE

Vista do parafuso do acesso ao parafuso de prótese sobre implante



Bastão de PTFE sendo introduzido



Parafuso protegido pronto para receber material restaurador definitivo